



ESwab® mit Mini-Tip FLOQSwabs®



Referenznummer: 491CE.A

VERWENDUNGSZWECK

Entnahme- und Transportsystem für klinische Proben, die aerobe, anaerobe und anspruchsvolle Bakterien, Viren und *Chlamydia* enthalten. Die geringere Tupfergröße bietet einen verbesserten Patientenkomfort und ist besonders für Kinder und spezielle Entnahmestellen geeignet. Kann für den Antigen- und Nukleinsäurenachweis von Bakterien, Viren und *Chlamydia* verwendet werden.

PACKUNGSMENGE

50 Einheiten (1 Tupfer und 1 Röhrchen)

ENTNAHMESTELLEN

- Auge
- Ohr
- Nasengänge
- Rachen
- Urogenitaltrakt

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

15 Monate bei 5 - 25 °C

PIONEERING DIAGNOSTICS

10-19 / 935238 / 002 / DE / A / Dieses Dokument ist rechtlich nicht bindend. bioMérieux behält sich das Recht vor, ohne Mitteilung Änderungen vorzunehmen. BIOMÉRIEUX und das BIOMÉRIEUX-Logo sind eingetragene Marken von bioMérieux oder einer ihrer Niederlassungen oder Tochtergesellschaften. ESwab und Mini-Tip sind Marken von Copan Italia S.p.A. Andere Namen oder Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. / bioMérieux S.A. RCS Lyon 63603399 / Photos: N. Boudard, Getty / © 2014 bioMérieux Deutschland / Photo: ACS Lyon 63603399


ENTNAHME EINER PROBE AM OHR mit ESwab® und Mini-Tip FLOQSwabs®




- 1** Öffnen Sie die Verpackung des ESwab®-Abstrichtupfers.
- 2** Entnehmen Sie das Röhrchen und den Tupfer. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Tupferspitze unterhalb der roten Markierung.
- 3** Drehen Sie den Tupfer beim Entnehmen der Patientenprobe vorsichtig.
- 4** Überführen Sie den Tupfer in das Röhrchen, bis sich die **rot markierte Sollbruchstelle** auf der Höhe der Röhrchenöffnung befindet.
- 5** Brechen Sie den Tupfer an der rot markierten Sollbruchstelle ab. Entsorgen Sie den abgebrochenen Teil des Tupferschafts. Lassen Sie den Tupfer im Röhrchen.
- 6** Das Röhrchen mit dem Deckel gut verschließen.
- 7** Notieren Sie die Patientendaten auf dem Etikett des Röhrchens oder bringen Sie das ID-Etikett des Patienten an.




ENTNAHME EINES ABSTRICHS IN DEN NASEN- GÄNGEN mit ESwab® und Mini-Tip FLOQSwabs®

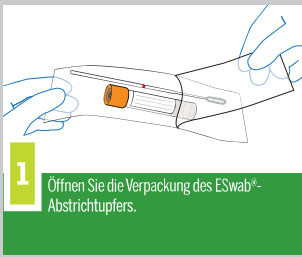

1 Öffnen Sie die Verpackung des ESwab®-Abstrichtupfers.

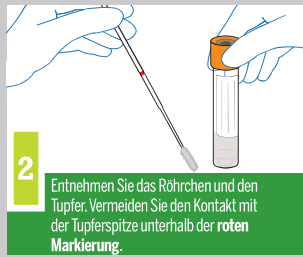


2 Entnehmen Sie das Röhrchen und den Tupfer. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Tupferspitze unterhalb der roten Markierung.

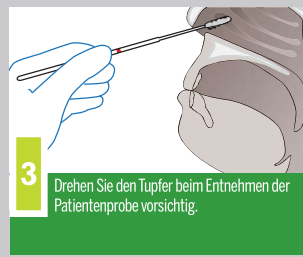

3 Drehen Sie den Tupfer beim Entnehmen der Patientenprobe vorsichtig.




4 Überführen Sie den Tupfer in das Röhrchen, bis sich die rot markierte Sollbruchstelle auf der Höhe der Röhrchenöffnung befindet.

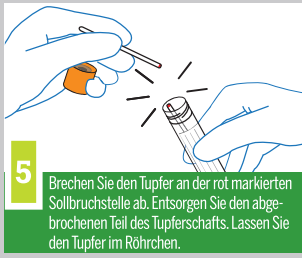

5 Brechen Sie den Tupfer an der rot markierten Sollbruchstelle ab. Entsorgen Sie den abgebrochenen Teil des Tupferschafts. Lassen Sie den Tupfer im Röhrchen.



6 Das Röhrchen mit dem Deckel gut verschließen.

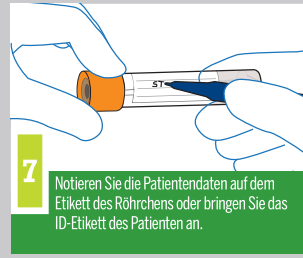


7 Notieren Sie die Patientendaten auf dem Etikett des Röhrchens oder bringen Sie das ID-Etikett des Patienten an.

bioMérieux Deutschland GmbH • Weberstraße 8 • 72622 Nürtingen • Tel.: +49 7022 3007 0 • Fax: +49 7022 36110
www.biomerieux.de


10-19 / 935238 / 002 / DE / A / Dieses Dokument ist rechtlich nicht bindend. bioMérieux behält sich das Recht vor, ohne Mitteilung Änderungen vorzunehmen. BIO-MERIEUX und das BIO-MERIEUX-Logo sind eingetragene und/oder erhaltene Marken von bioMérieux oder einer ihrer Niederlassungen oder Tochtergesellschaften. ESwab und Mini-Tip sind Marken von Copan Italia S.p.A. Andere Namen oder Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. / bioMérieux S.A. RCS Lyon 63603399 / Fotos: N. Bourdri, Getty / Getreidat in Deutschland / Photo / ACS Lyon 63603399




ENTNAHME EINES RACHENABSTRICHS mit ESwab® und Mini-Tip FLOQSwabs®

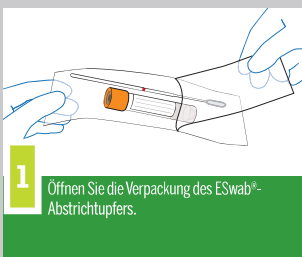

1 Öffnen Sie die Verpackung des ESwab®-Abstrichtupfers.

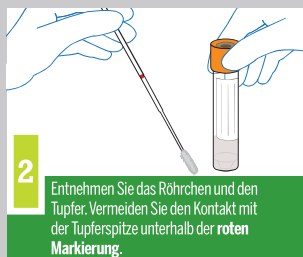


2 Entnehmen Sie das Röhrchen und den Tupfer. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Tupferspitze unterhalb der roten Markierung.

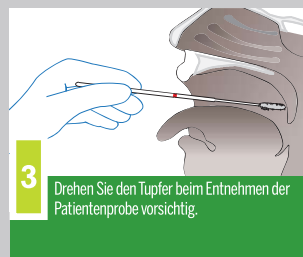

3 Drehen Sie den Tupfer beim Entnehmen der Patientenprobe vorsichtig.




4 Überführen Sie den Tupfer in das Röhrchen, bis sich die rot markierte Sollbruchstelle auf der Höhe der Röhrchenöffnung befindet.

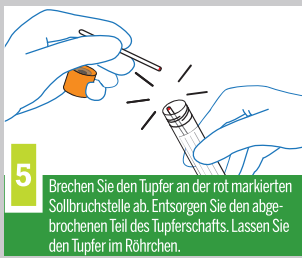

5 Brechen Sie den Tupfer an der rot markierten Sollbruchstelle ab. Entsorgen Sie den abgebrochenen Teil des Tupferschafts. Lassen Sie den Tupfer im Röhrchen.



6 Das Röhrchen mit dem Deckel gut verschließen.

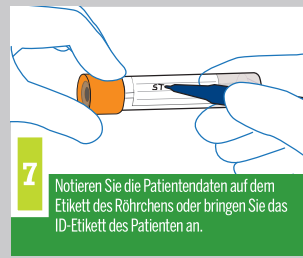

7 Notieren Sie die Patientendaten auf dem Etikett des Röhrchens oder bringen Sie das ID-Etikett des Patienten an.

bioMérieux Deutschland GmbH • Weberstraße 8 • 72622 Nürtingen • Tel.: +49 7022 3007 0 • Fax: +49 7022 36110
www.biomerieux.de

10-19 / 935238 / 002 / DE / A / Dieses Dokument ist rechtlich nicht bindend. bioMérieux behält sich das Recht vor, ohne Mitteilung Änderungen vorzunehmen. BIO-MERIEUX und das BIO-MERIEUX-Logo sind eingetragene und/oder erhaltene Marken von bioMérieux oder einer ihrer Niederlassungen oder Tochtergesellschaften. ESwab und Mini-Tip sind Marken von Copan Italia S.p.A. Andere Namen oder Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. / bioMérieux S.A. RCS Lyon 63603399 / Fotos: N. Bourdri, Getty / Getreidat in Deutschland / Photo / ACS Lyon 63603399



UNIVERSAL LBM® ESwab®



Referenznummer: 490CE.A

VERWENDUNGSZWECK

Entnahme- und Transportsystem für klinische Proben, die aerobe, anaerobe und anspruchsvolle Bakterien, Viren und *Chlamydia* enthalten. Kann für den Antigen- und Nukleinsäurenachweis von Bakterien, Viren und *Chlamydia* verwendet werden.

PACKUNGSGEHALT

50 Einheiten (1 Tupfer und 1 Röhren)

ENTNAHMESTELLEN

- Nase
- Rachen
- Vagina
- Rektum
- Wunden


LAGERUNG UND HALTBARKEIT

15 Monate bei 5 - 25 °C


PIONEERING DIAGNOSTICS




ENTNAHME EINER NASALPROBE mit ESwab®

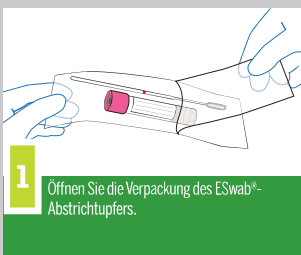

1 Öffnen Sie die Verpackung des ESwab®-Abstrichtupfers.

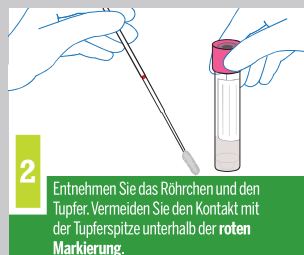


2 Entnehmen Sie das Röhren und den Tupfer. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Tupferspitze unterhalb der roten Markierung.

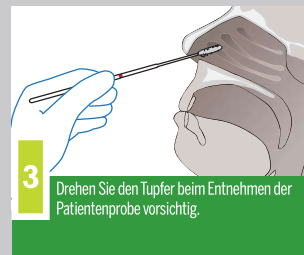

3 Drehen Sie den Tupfer beim Entnehmen der Patientenprobe vorsichtig.




4 Überführen Sie den Tupfer in das Röhren, bis sich die rot markierte Sollbruchstelle auf der Höhe der Röhrenöffnung befindet.

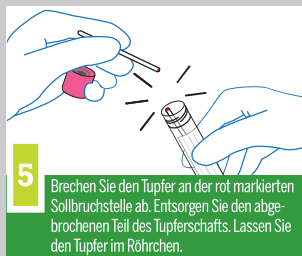

5 Brechen Sie den Tupfer an der rot markierten Sollbruchstelle ab. Entsorgen Sie den abgebrochenen Teil des Tupferschafts. Lassen Sie den Tupfer im Röhren.




6 Das Röhren mit dem Deckel gut verschließen.

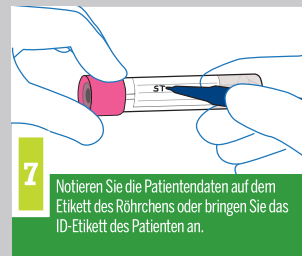

7 Notieren Sie die Patientendaten auf dem Etikett des Röhrens oder bringen Sie das ID-Etikett des Patienten an.

ENTNAHME EINER RACHENPROBE mit ESwab®

10.19 / 983528 / 002 / DE / A / Dieses Dokument ist rechtlich nicht bindend. bioMérieux behält sich das Recht vor, ohne Mitteilung Änderungen vorzunehmen. BIO-MERIEUX und das BIO-MERIEUX Logo sind eingetragte und/oder eingetragene Marken von bioMérieux oder einer ihrer Niederlassungen oder Tochtergesellschaften. ESwab und LBM sind Marken von Copart Italia S.p.A. Andere Namen oder Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. / bioMérieux S.A. RCS Lyon 67 5820 389 / Fotos: N. Boudrid, Getty / Laerdal in Deutschland/ Miera / MCS Lyon B 938 10024

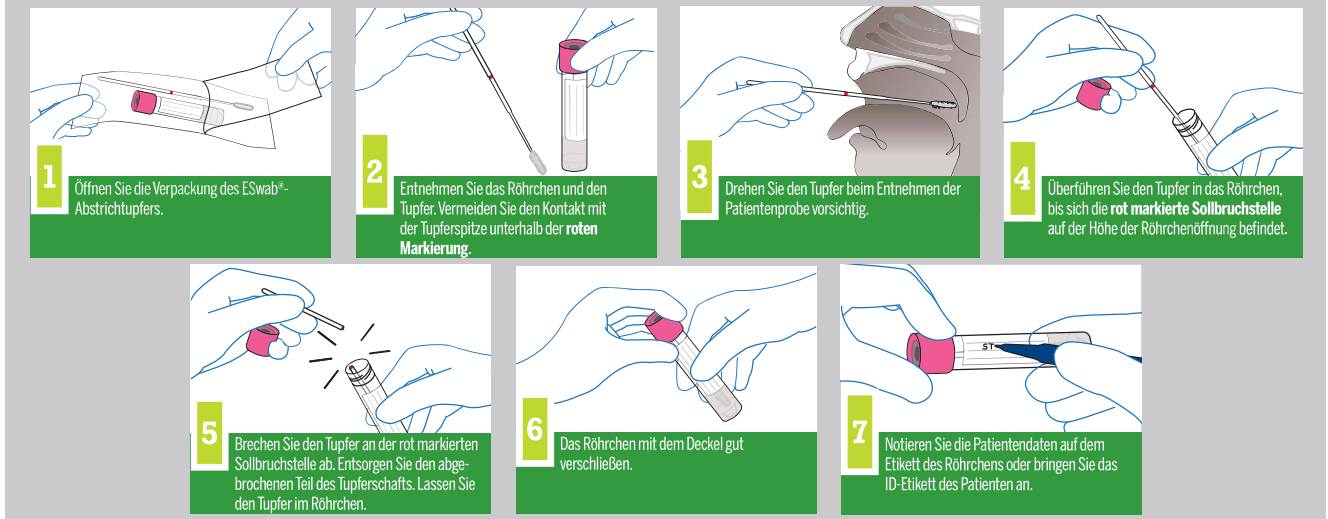

- 1** Öffnen Sie die Verpackung des ESwab®-Abstrichtupfers.
- 2** Entnehmen Sie das Röhrchen und den Tupfer. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Tüpferspitze unterhalb der roten Markierung.
- 3** Drehen Sie den Tupfer beim Entnehmen der Patientenprobe vorsichtig.
- 4** Überführen Sie den Tupfer in das Röhrchen, bis sich die rot markierte Sollbruchstelle auf der Höhe der Röhrchenöffnung befindet.
- 5** Brechen Sie den Tupfer an der rot markierten Sollbruchstelle ab. Entsorgen Sie den abgebrochenen Teil des Tüpferschafts. Lassen Sie den Tupfer im Röhrchen.
- 6** Das Röhrchen mit dem Deckel gut verschließen.
- 7** Notieren Sie die Patientendaten auf dem Etikett des Röhrchens oder bringen Sie das ID-Etikett des Patienten an.